

Ferritin-Järn/Jerntest



Innehåll / Indhold / Innhold

1st Rengöringsservett / Rengöringsservietter
 1st Testkassett / Test cassette
 1st Buffert
 1st Nål / Pin
 1st Pipett

OBS / BEMÆRK / MERK


Läs alltid igenom instruktionerna en gång innan du påbörjar testet.
 Læs altid instruktionerne en gang, før du starter testen.
 Les alltid instruksjonene en gang før du starter testen.



Gör så här / Gør dette / Gjør dette

1. Rengör ditt finger med alkohol rengöringsservetten.
Rengør fingeren med alkoholrensere.
Rengjør fingeren med alkoholrensene.
2. Ta bort skyddshatten på nålen och stick dig i fingertoppen, pressa fram blod.
Fjern beskyttelseshætten på nålen, og pin et hul i fingerspidsen, og klem blod.
Fjern beskyttelseshetten på nålen og stikk den i fingertuppen og klem blod.
3. **OBS** (Kläm inte på pipetten, Klem ikke piprtten, Ikke klem pipetten)
Sug upp blod till markeringen med pipetten genom att föra pipetten till blodytan.
Absorber blod til mærket med en pipetten ved at bringe bringe det til blodoverfladen.
Absorber blod til merket med pipetten ved å bringe det til blodoverflaten.
4. Droppa allt blod i testkassetten brunn (S).
Sæt alt blod ned i brønden i testkassetten (S).
Tilsett alt blod i brønnen til testkassetten (S).
5. Droppa därefter 1 droppe buffert.
Slip derefter 1 dråbe buffer.
Tilsett deretter 1 dråpe buffer.
6. Vänta 5 minuter för att avläsa resultatet. *Efter 10 min ska resultatet inte tolkas.*
Vent 5 minutter for at læse resultatet. *Efter 10 minutter bør resultatet ikke fortolkes.*
Vent 5 minutter for å lese resultatet. *Efter 10 minutter skal resultatet ikke tolkes.*

Resultat / Resultater / Resultater

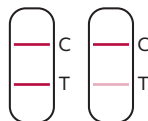

Normal

Två linjer syns, både T (Test) och C (Kontroll). Detta betyder att Ferritin koncentrationen i blodet är normal. Ingen tecken på järnbrist.

To linjer er synlige, både T (test) og C (kontroll). Dette betyder, at Ferritin-koncentrationen i blodet er normal. Intet tegn på jernmangel.

To linjer er synlige, både T (Test) og C (Kontroll). Dette betyr at Ferritin-koncentrasjonen i blodet er normal. Ingen tegn på jernmangel.




Onormal
Abnorm
Unormal

Bara en linje syns, C (Kontroll). Detta betyder att Ferritin koncentrationen i blodet är lågt. Tecken på järnbrist, ta kontakt med läkare/sjukvården.

Kun en linje er synlig, C (kontrol). Dette betyder, at Ferritin-koncentrationen i blodet er lav. Tegn på jernmangel, kontakt læge / sundhedspersonale.

Bare en linje er synlig, C (Control). Dette betyr at Ferritin-konsentrasjonen i blodet er lav. Tegn på jernmangel, kontakt lege / helsepersonell.

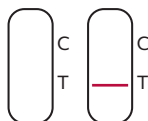

Ogiltigt
Ugyldigt

Ogiltigt. Kontroll linje syns ej. Otillräckligt med blod eller inkorrekt användning av test. Ta ett nytt test och gå genom bruksanvisningen i detalj. Om även det testet blir ogiltigt kontakta distributör.

Ugyldigt. Kontrollinje er ikke synlig. Utilstrækkeligt blod eller forkert brug af testen. Tag en ny test, og gennemgå instruktionerne detaljeret. Hvis selv denne test bliver ugyldig, skal du kontakte distributøren.

Ugyldigt. Kontrollinjen er ikke synlig. Utilstrekkelig blod eller feil bruk av testen. Ta en ny test og gå gjennom instruksjonene i detalj. Hvis til og med den testen blir ugyldig, kontakt distributøren.

Brytpunkten för testet är 30ng/ml. Vid Normal utslag innebär det att du har ferritin halter som är större än 30ng/ml.

Testens brudpunkt er 30ng/ml. Hvis det er Normal, betyder det, at du har ferritin-niveau er, der er større end 30ng/ml.

Bruddpunktet for testen er 30ng/ml. Hvis det er Normal, betyr det at du har ferritin-nivåer som er større enn 30ng/ml.