

Prostata Test PSA



Innehåll / Indhold / Innhold

1st Rengöringsservett / Rengöringsservietter
 1st Testkasett / Test cassette
 1st Buffert
 1st Nål / Pin
 1st Pipett

OBS / BEMÆRK/ MERK

Läs alltid igenom instruktionerna en gång innan du påbörjar testet.
 Læs altid instruktionerne en gang, før du starter testen.
 Les alltid instruksjonene en gang før du starter testen.



Gör så här / Gør dette / Gjør dette

- Rengör ditt finger med alkohol rengöringsservetten.
Rengør fingeren med alkoholrensener.
Rengjør fingeren med alkoholrensener.
- Ta bort den skyddshatten på nålen och stick dig i fingertoppen, pressa fram blod.
Fjern beskyttelseshætten på nålen, og pin et hul i fingerspidsen, og klem blod.
Fjern beskyttelseshetten på nålen og stikk den i fingertuppen og klem blod.
- Sug upp 2-3 droppar blod med pinetten genom att föra pinettspetesen till blodytan.
Absorber 2-3 dråber blod med en pincet ved at bringe pincetten til blodoverfladen.
Absorber 2-3 dråper blod med pinsetten ved å bringe pinsetten til blodoverflaten.
- Droppa 2 droppar blod i testkasettens brunn (S).
Sæt 2 dråber blod ned i brønden i testkassetten (S).
Tilsett 2 dråper blod i brønnen til testkassetten (S).
- Droppa därefter 2 droppar buffert.
Slip därefter 2 dråber buffer.
Tilsett deretter 2 dråper buffer.
- Vänta 5-10 minuter för att avläsa resultatet. *Efter 10 min ska resultatet inte tokas.*
Vent 5-10 minutter for at læse resultatet. *Efter 10 minutter bør resultatet ikke tages.*
Vent 5-10 minutter for å lese resultatet. *Efter 10 minutter skal ikke resultatet tas.*

Brytpunkten för testet är 4ng/ml. Vid positivt utslag innebär det att du har PSH halter som är större än 4ng/ml.

Testens brudpunkt er 4 ng/ml. Hvis det er positivt, betyder det, at du har PSH-niveauer, der er større end 4 ng/ml.

Bruddpunktet for testen er 4ng/ml. Hvis det er positivt, betyr det at du har PSH-nivåer som er større enn 4ng/ml.

Resultat / Resultater / Resultater

